

# ハードクレンジングのご使用について

ハードクレンジングには、取扱説明書は添付されておりません。  
こちらは、商品の箱外面と内面に記載されている事項を記したものです。

## 【主成分】

両性界面活性剤、非イオン性界面活性剤、陰イオン性界面活性剤

## 【内容量】

8.8mL

## 【製造番号・使用期限 (EXP)】

本体に記載。開封後はできる限りお早めにお使いください。

## 【使用方法】

1. レンズに本剤を 4、5 滴落とし、指の腹でレンズの表裏をやさしくこすり洗いしてください。
2. レンズの表裏を水道水で十分にすすいでください。

## 【使用上の注意】

1. 使用方法をお守りください。
2. レンズを取り扱う前に、手を石鹸等でよく洗ってください。
3. 万一、目や皮膚に異常を感じた場合は、使用を中止し医師の診断をうけてください。
4. 雑菌等の繁殖を防ぐため、容器の先端には触れないでください。
5. 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
6. 点眼、服用はしないでください。
7. 小児の手の届かないところに保管してください。
8. 使用後はキャップをしっかり締め、直射日光を避けて冷暗所に保管してください。

## 【使用方法の遵守に関する事項】

使用方法及び使用上の注意等の内容を守り正しく使用しないと眼感染症等を生じ、重篤な場合には視力を失う可能性もあり得ますので、記載された事項は必ず守ってください。

- ハードコンタクトレンズをご使用の際は、必ずコンタクトレンズの添付文書をよく読んで、正しい使用方法でご使用ください。
- ソフトコンタクトレンズには絶対に使用しないでください。